

# 唾液専用抗原検査キット使用説明

1 キットが全て揃っているか確認する。

★開封後は1時間以内に使用してください。  
★テストカートリッジは室温に戻してから使用してください



テストカートリッジ




展開液・採集容器




検体採取用スワブ


2 キットを用意します

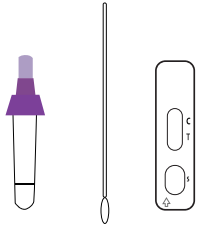


3 スワブ(綿棒)で口腔内・歯ぐき周りの唾液を採取します

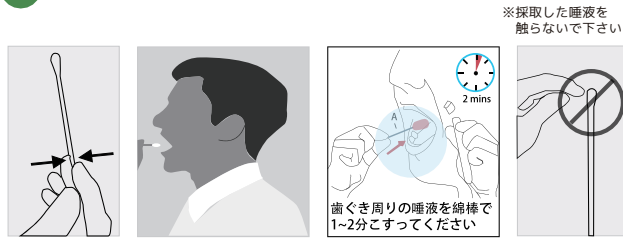


4 採集容器の中の展開液にスワブを入れてかき混ぜてください

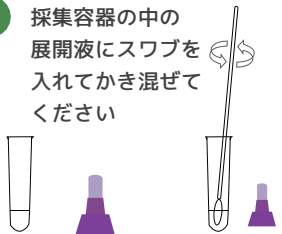


5 かき混ぜましたらスワブを入れた状態で10回ほど揉んでください

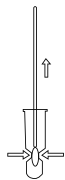


6 キャップをしてふたたび数回攪拌してください

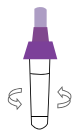

7 テストカートリッジの下の部分に混ぜ合わせた液を3滴ほど垂らしてください。

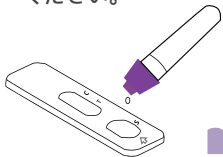

8 全体が徐々に染まったのち、約15分でラインがはっきり確認できます。

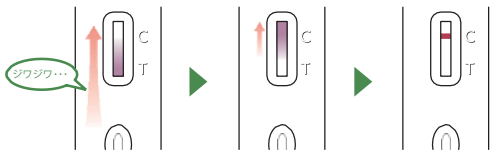

展開液の滴下後、10~15分経過したら結果が確認できます。

※20分以上の長時間経過後の結果は無効になります。

陰性	陽性	無効
ウイルス未検出	ウイルス検出	Cのラインが出ない場合は無効 <再検査が必要>

## ■保管条件と有効期限

- 保管時は冷蔵庫などの冷暗所（2℃～15℃）で保管いただくよう推奨いたします。また、長期保存の際はチャック付き袋で密閉状態にて保管して下さい。
- 本検査キットの内容物は開封後、室温下で1時間以内にご使用ください。生産日から10ヶ月が本検査キットの有効期限となります。適切な条件で保管されていても、有効期限が切れたキットは使用しないでください。
- 凍結しないでください。
- 破損等が確認されるキットは使用しないでください。


## ■重要事項

本製品の陰性結果は、SARS-COV-2 に感染している可能性を否定するものではありません。検査キットの判定結果は、治療及び、診断目的に使用はできません。

※本製品は研究試薬です。

※本製品は清潔な環境で正確・速やかに検査することが重要です。

※本製品の使用により発生した損害および損失について弊社は一切の責任を負いません。

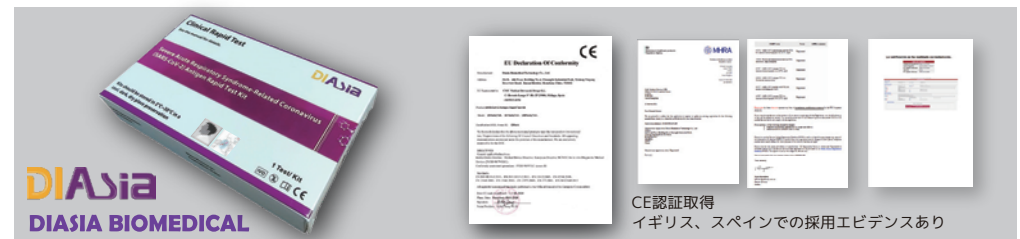

CE認証取得  
イギリス、スペインでの採用エビデンスあり